

OPTIGEN POZITÍV KONTROLL REAGENS

Gyártási s.: 1244-41

RENDELTESSZERŰ FELHASZNÁLÁS

Az OPTIGEN Pozitív Kontrol Reagens, mint minőségellenőrző reagens használandó az OPTIGEN teszt működésének ellenőrzésére.

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS ALAPELV

A tesztek működésének objektív megítéléséhez minőségellenőrző anyagok használatára van szükség. A Pozitív Kontrollt számos specifikus allergénnel teszteltük, és megadjuk az ezekre várható értékeket. Más, itt fel nem sorolt allergének is adhatnak pozitív eredményt ezzel a gyártási számú kontroll reagenssel.

REAGENS

Az OPTIGEN Pozitív Kontrol Reagens humán szérumból készül. A kontroll folyadék.

TÁROLÁS ÉS STABILITÁS

Az OPTIGEN Pozitív Kontrol Reagens $-20 \pm 10^{\circ}$ C-on tárolva a fiola címkéjén feltüntetett lejárati ideig stabil. Felolvasztás után tároljuk a reagens $2-8^{\circ}$ C-on, maximum nyolc hétig. Ne fagyasszuk-olvasszuk ismételtlen.

AZ ÉRTÉKEK MEGÁLLAPÍTÁSA

Az ezen a betéten feltüntetett átlagértékeket és elfogadható tartományokat a Hitachi Chemical Diagnostics, Inc. állapította meg, és azok erre a gyártási számú OPTIGEN Pozitív Kontrol Reagensre specifikusak. Az egyes laboratóriumok átlagai, minden egyes allergénre, a várható értékek tartományba kell, hogy essenek. Az eljárás vagy a reagensek módosítása megváltoztathatja a középértékeket. Minden laboratóriumnak meg kell határoznia saját átlagértékeit és az elfogadható tartományokat; az itt megadott értékek csak iránymutatónak használandók.

A Hitachi Chemical Diagnostics, Inc. definíciója szerint e kontroll elfogadható működésének kritériuma az, ha a tesztelt allergének 85% a várható értékek tartományába esik.

AZ ELJÁRÁS

Minden teszt csoportban legyen egy OPTIGEN Pozitív Kontrol Reagens minta is. Hagyjuk a kontroll reagenst szobahőmérsékletre melegedni. Használat előtt többször, óvatosan fordítsuk felle. A referencia reagenst a betegek mintáira előírt eljárással kell tesztelni.

KORLÁTOZÁSOK

Az OPTIGEN Pozitív Kontrol Reagenst nem szabad a lejárati időn túl használni! Ha mikrobiális szennyeződésre utaló jelet vagy nagyfokú zavarosságot észlelünk, dobjunk el a fiolát.

FIGYELMEZTETÉS

Ez a termék humán forrásból származó anyagot tartalmaz. Potenciálisan fertőzőként kezelendő!

A kontroll gyártásához felhasznált minden donor egységet az FDA által elfogadott módszerekkel vizsgálták meg, és Hepatitis B felszíni Antigén-re (HBsAg), Hepatitis C Antigénre, és HIV-1 elleni ellenanyagra negatívnak találták őket. Egyetlen teszt sem nyújthat tökéletes biztosítékot arra, hogy humán eredetű anyagokat tartalmazó termékek mentesek ezektől és más fertőző ágensektől. Ezt a terméket ugyanolyan óvintézkedéseket betartva kell kezelni, mint a betegek mintáit.

CSAK IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA!

<u>VÁRHATÓ ÉRTÉKEK</u>	<u>OSZ- TÁLY</u>
Alternaria	0
Aspergillus	0
Nyír, Fehér	0
Macska	2-4
Cladosporium	2-4
Csótány	0
Tőkehal	0
Kutya	3-4
Tojásfehérje	0
Latex	2-4
Tej	0
Atka, farinae	2-4
Atka, pteronyssinus	3-4
Fekete üröm	0
Földmogyoró	1-3
Parlagfű Keverék I	0
Ríz	0
Szója	0
Mezei komócsin	3-4
Búza	0

Kontrol Kit Katalógus szám:
Palack Katalógus szám
Kontrol Kit Tartalma:

82061
93526
3 x 3 ml