

OPTIGEN

NEGATÍV KONTROLL REAGENS Gyártási sz.: 1273-21

RENDELTESSZERŰ FELHASZNÁLÁS

Az OPTIGEN Negatív Kontroll, mint minőségellenőrző reagens használandó az OPTIGEN teszt működésének ellenőrzésére.

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS ALAPELV

A tesztek működésének objektív megítéléséhez minőségellenőrző anyagok használatára van szükség. A Negatív Kontrollt számos specifikus allergénnel teszteltük, és megadjuk az ezekre várható értékeket.

REAGENS

OPTIGEN Negatív Kontroll Reagens humán szérumból készül. A kontroll folyadék halmazállapotú.

TÁROLÁS ÉS STABILITÁS

Az OPTIGEN Negatív Kontroll Reagens $-20 \pm 10^{\circ}$ C-on tárolva a fiola címkéjén feltüntetett lejárati ideig stabil. Ne fagyasszuk/olvasszuk ismételt.

AZ ÉRTÉKEK MEGÁLLAPÍTÁSA

Az ezen a betéten feltüntetett átlagértékeket és elfogadható tartományokat a Hitachi Chemical Diagnostics, Inc. állapította meg, és azok erre a gyártási számú OPTIGEN Negatív Kontroll Reagensre adottak. Az egyes laboratóriumok átlagai minden egyes allergénre a várható tartományba kell, hogy essenek. Az eljárás vagy a reagensek módosítása megváltoztathatja a középértékeket. Minden laboratóriumnak meg kell határozni saját átlagértékeit és az elfogadható tartományokat; az itt megadott értékek csak tájékoztató jellegűek.

A Hitachi Chemical Diagnostics, Inc. Definíciója szerint e kontroll elfogadható működésének kritériuma az, ha a tesztelt allergének 85% a várható értékek tartományába esik.

AZ ELJÁRÁS

Mindegyik futtatásnál legyen egy OPTIGEN Negatív Kontroll minta is. Hagyjuk a kontroll reagenst szobahőmérsékletre melegedni. Használat előtt többször, óvatosan fordítsuk fel-le. A referencia reagenst a betegek mintáira előirt eljárással, kell tesztelni.

KORLÁTOZÁSOK

Az OPTIGEN Negatív Kontroll Reagenst nem szabad a lejárati időn túl használni! Ha mikrobiális szennyeződésre utaló jelet vagy nagyfokú zavarosságot észlelünk, dobjuk el a fiolát.

FIGYELMEZTETÉS

Ez a termék humán forrásból származó anyagot tartalmaz. Potenciálisan fertőzőként kezelendő!

A kontroll gyártásához felhasznált minden donor egységet az FDA által elfogadott módszerekkel vizsgáltak meg, és Hepatitis B felszíni Antigénre (HBsAg) és HIV-1 ellenanyagra negatívnak találták őket. Egyetlen teszt sem nyújthat tökéletes biztosítékot arra, hogy humán eredetű anyagokat tartalmazó termékek mentesek ezektől és más fertőző ágensektől. Ezt a terméket ugyanolyan óvintézkedéseket betartva kell kezelni, mint a betegek mintáit.

CSAK IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA!

<u>VÁRHATÓ ÉRTÉKEK</u>	<u>OSZ-TÁLY</u>
Alternaria	0
Aspergillus	0
Nyír, Fehér	0
Macska	0
Cladosporium	0
Csótány	0
Tőkehal	0
Kutya	0
Tojásfehérje	0
Latex	0
Tej	0
Atka, farinae	0
Atka, pteronyssinus	0
Fekete üröm	0
Földimogyoró	0
Parlagfű keverék I	0
Rizs	0
Szója	0
Mezei komócsin	0
Búza	0

Kontroll Kit Katalógus szám:
Palack Katalógus szám
Kontroll Kit Tartalma:

82062
93527
3 x 3 mL